

Link do produktu: <https://sklep.corioacs.pl/dezynfekcja-powierzchni-medisept-velox-pianka-foam-p-3167.html>



## Dezynfekcja powierzchni MEDISEPT Velox PIANKA Foam

Cena brutto	<b>32,99 zł</b>
Cena netto	<b>30,55 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>4215</b>
Kod EAN	<b>5907626633405</b>
Producent	<b>Medisept</b>

### Opis produktu

## MEDI-SEPT Velox Foam Extra - PIANKA DO DEZYNFEKCJI 1 L(ID 4215)

Pianka Velox Foam Extra zalecana jest do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Może być stosowana na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz na bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Przeznaczona również do mycia i dezynfekcji wycisków stomatologicznych i protez. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada przyjemny zapach.

Skuteczność mikrobiologiczna: Bakterie (w tym MRSA) wg norm EN14885, EN 1276, EN 13727: 1 min. Grzyby (*C. albicans*) wg norm EN 14885, EN 1650, EN 13624: 1 min.. Prutki grzyźlicy (*M. terrae*) wg norm EN 14885, EN 14348: 5 min.. Wirusy otoczkowe (m. in. HBV, HCV, HDV, HIV, grypa typu A, B, C, BVDV, Vaccinia) wg norm RKI/DVV) 1 min.

Sposób użycia: Produkt wyposażony jest w podwójną końcówkę do sprayu i pianki. Zaleca się rozprowadzenie preparatu w postaci pianki. Spryskać preparatem powierzchnię z odległości 20-30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Nadmiar preparatu zdjąć przy użyciu np. ręcznika jednorazowego. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą. W celu dezynfekcji szczególnie wrażliwych powierzchni (np. ze skóry) zalecany jest test w niewidocznym miejscu. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego pracownika.

Pojemność: 1 litr