

Link do produktu: <https://sklep.corioocs.pl/plyn-do-dezynfekcji-medisept-alodes-n-1l-p-13483.html>



## Płyn do dezynfekcji MEDISEPT ALODES N 1L

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>27,99 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>25,92 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>3343</b>          |
| Kod EAN          | <b>5907626633771</b> |
| Producent        | <b>Medisept</b>      |

### Opis produktu

## MEDISEPT ALODES N 1L gotowy do użycia płyn do dezynfekcji i mycia narzędzi (ID 3343)

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze.

**Zastosowanie:** Alodes N przeznaczony jest do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz narzędzi do manicure nie naruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej, zachowując aktywność do 14 dni.

#### Cechy produktu:

Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.

Do stosowania na powierzchniach podłogowych i ponadpodłogowych (ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły, leżanki, fotele).

Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym (pozaklinicznym), domach opieki, sanatoriach, siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu, przedszkolach, szkołach.

Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1 litr koncentratu = 200 l r. roboczego.

#### Sposób użycia:

Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia z wodą.

Narzędzia zanurzyć w naczyniu z płynem dokładnie pokrywając wszystkie elementy.

Po dezynfekcji spłukać pod wodą.

---

Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

**Skład:**

100g zawiera:

0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina

0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),,alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól)

Pojemność: 1 litr